


Ventajas del nuevo dispositivo de seguridad para el profesional sanitario:

- Dispone de un sistema más fácil de usar, cómodo y ergonómico.
- Utiliza un dispositivo fiable que permite una inyección segura.
- Consigue saber fácilmente si la inyección se ha administrado correctamente.

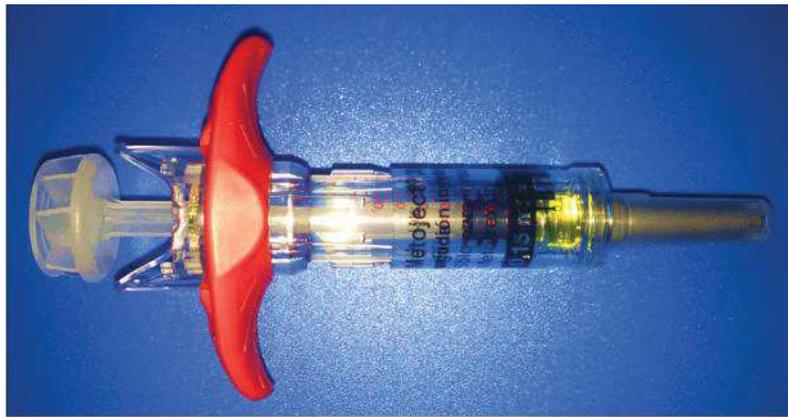

Características del dispositivo de seguridad:

El nuevo sistema de protección se acciona mediante la liberación de un cilindro protector, el cual solo puede activarse en el momento que la jeringa se haya vaciado completamente, empujando el émbolo hasta el fondo.

- I. Émbolo ergonómico para más suavidad en la inyección.**
 - Amplia superficie de almohadilla para el pulgar.
 - Polipropileno resistente para evitar que se doble.
- II. Pestaña de soporte de dedos más ancha.**
 - Para el manejo, agarre y comodidad del usuario.
- III. Forma redonda**
 - Superficie de etiquetado amplio.
 - Visible para el usuario.
- IV. Clara visibilidad de la punta.**
 - Resorte situado en la parte superior del dispositivo.
 - Permite ver las burbujas de aire y el líquido en la punta de la jeringa.
 - Adaptado a bajos volúmenes de llenado con fácil visualización del medicamento



Aplicación de Metoject® con el nuevo del dispositivo:

Las mejores zonas del cuerpo para la inyección de la jeringa precargada son la parte superior del muslo y el abdomen, salvo el área alrededor del ombligo.

De forma habitual se limpiará el área que rodea el lugar seleccionado para el pinchazo con el algodón impregnado en alcohol que se incluye en la caja.

A continuación, se retirará el capuchón de la jeringuilla y formaremos un pliegue en la piel apretando suavemente el área en el lugar de la inyección. Se deberá mantener dicho pliegue con los dedos hasta que se haya retirado la jeringa de la piel, tras la aplicación de la inyección.

Instrucciones de uso del nuevo dispositivo:

- 1- Insertar totalmente la aguja en la piel en **ángulo de 90 grados**.



- 2- Empujar lentamente el embolo e inyectar el líquido bajo la piel. **Retirar la jeringa de la piel en el mismo ángulo de 90 grados**.



- 3- **Al mismo tiempo que se retira la aguja de la piel, un cilindro protector encerrará la aguja automáticamente.**

